

ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия

Раствор стерильный для ингаляционного и интраназального введения Breather Treat (Бризер Трит)

Состав

1 ml (мл) раствора содержит: натрия хлорид – 30,0 mg (мг).

Содержимое упаковки

По 4 ml (мл) в контейнерах полимерных, по 10 контейнеров в пачке из картона.

Описание

Breather Treat (Бризер Трит) – раствор стерильный для ингаляционного и интраназального введения, который облегчает дыхание путем разрежения и улучшения выведения секрета слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей у пациентов с воспалительными заболеваниями органов дыхания за счет осмотического эффекта. Раствор стимулирует защитные свойства слизистых оболочек верхних дыхательных путей благодаря способности активно разрежать и выводить выделения, образующиеся при инфекционных и аллергических заболеваниях. Применяется в комплексной терапии заболеваний дыхательных путей, в том числе с использованием ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс).

Целевое назначение

Breather Treat (Бризер Трит) предназначен для уменьшения отека слизистой оболочки, разрежения секрета и облегчения дыхания.

Показания

Острые респираторные вирусные инфекции, грипп, ларингиты, трахеиты, бронхиты, бронхиолиты, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь и хронические обструктивные болезни легких. Также применяется при острых и хронических заболеваниях носоглотки, носовой полости и пазух, гипертрофии аденоидов у детей, круглогодичном и сезонном аллергическом рините.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов медицинского изделия.

Целевая группа (популяция)

Лица, нуждающиеся в уменьшении отека слизистой оболочки дыхательных путей, разрежении секрета и облегчении дыхания.

Способ применения

Использование с помощью ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс)

Ингаляцию раствора можно проводить при помощи ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс) с использованием специальной маски на лицо, загубника или назальной канюли. Перед проведением процедуры обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению ингаляционной системы. Соблюдайте правила эксплуатации ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс).

При применении детям (с рождения): использовать от 1 до 4 ml (мл) раствора. Доза, продолжительность и частота применения определяются врачом.

При применении взрослым: использовать по одному контейнеру 2 раза в день. При необходимости частота использования может быть увеличена до 4 раз в день.

1. Подготовьте к использованию ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс).
2. Откройте пакет из фольги и отделите однодозовый контейнер. Убедитесь, что контейнер не поврежден.
3. Встряхните отделенный контейнер. Другие контейнеры оставьте в пакете из фольги и поместите их в картонную коробку. Не извлекайте контейнеры из пакета без необходимости.
4. Держа контейнер за верхний край, поверните другой край, чтобы открыть контейнер.
5. Вставьте контейнер в ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс) открытым краем вниз и слегка нажмите. Убедитесь, что весь раствор перетек в резервуар устройства.
6. Закройте резервуар системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс) и используйте по назначению.

После использования промойте ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс), остатки раствора утилизируйте.

Интраназальное введение

Взрослым – по 3 капли; детям – по 1–2 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки.

Способ применения для взрослых: перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос. Для предупреждения вытекания раствора необходимо лечь или сесть и запрокинуть голову назад, затем закапать раствор. При закапывании раствора в правый носовой ход голова должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево, и, наоборот, голова должна быть наклонена вправо при закапывании раствора в левый носовой ход. После закапывания желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 минут, после чего освободить носовые ходы от разреженного секрета. Остатки раствора на лице следует вытереть салфеткой.

Способ применения для детей: перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы ребенка от секрета. После очищения носа от секрета закапать раствор в каждый носовой ход. При закапывании раствора в правый носовой ход голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево и, наоборот, голова ребенка должна быть наклонена вправо при закапывании раствора в левый носовой ход. После закапывания ребенку желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 минут, после чего следует посадить ребенка и помочь ему освободить носовые ходы от разреженного секрета. Остатки раствора на лице следует вытереть салфеткой.

Побочные реакции

У лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов раствора возможны реакции повышенной чувствительности. В единичных случаях могут возникать гиперемия слизистой оболочки носа, головокружение, кашель или бронхоспазм.

В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует немедленно прекратить использование медицинского изделия и сообщить врачу и производителю.

Ограничения, меры предосторожности и предостережения

- Раствор предназначен для применения только путем ингаляционного или интраназального введения. Используйте изделие в соответствии с инструкцией по применению. Проконсультируйтесь с врачом перед применением, если у Вас есть вопросы.
- Использование детьми должно проходить под наблюдением взрослых!

- Перед использованием медицинского изделия проверьте целостность упаковки и срок годности. Не используйте изделие при повреждении первичной упаковки или если истек срок годности.
- Не смешивать с другими растворами или лекарственными средствами!
- Изделие предназначено только для однократного применения. Повторное использование может привести к инфицированию. Не используйте повторно.
- Утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации медицинских отходов.

Условия хранения

Хранить в защищенном от солнечных лучей месте при температуре от +5 °С до +30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Срок годности действует при соблюдении условий хранения в неповрежденной упаковке.

Название и адрес производителя

ООО «Юрия-фарм», Украина, 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 275-92-42, +38 (044) 275-01-08.






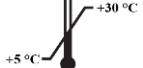

E-mail: uf@uf.ua



www.uf.ua

Адрес производства: Украина, 18030, г. Черкасы, ул. Кобзарская, 108.

Если у Вас есть замечания к медицинскому изделию или Вы хотите оставить отзыв, пожалуйста, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- 1) отправьте письмо на электронную почту feedback@uf.ua;
- 2) отправьте текстовое сообщение с помощью приложений Viber, Telegram или WhatsApp на номер +38 (095) 275-33-01;
- 3) позвоните по номеру +38 (095) 275-33-01 или +38 (0800) 401-771 (тарификация звонков по этим номерам – согласно тарифам Вашего оператора).

Графические символы и их разъяснение	
	Sterile medical device in primary packaging. Sterilized using steam or dry heat/Стерильное медицинское изделие в первичной упаковке. Стерилизовано с использованием пара или сухого жара
	Do not use if package is damaged/Не использовать при повреждении упаковки
	Do not re-use/Не использовать повторно
	Consult instructions for use/Ознакомление с инструкциями по применению
	Manufacturer/Производитель
	Temperature limit/Температурное ограничение
	Date of manufacture/Дата изготовления

	Use-by date/Не использовать после
партия 	Batch code/Код партии

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 22.08.2023.

Версия: 02.